

人工透析装置用除菌剤（過酢酸系）

プレモーブ・バイオクリーン

PREMOVE-BC

除菌・洗浄効果がグレードアップ

低濃度においても優れた除菌・洗浄効果を示し、
バイオフィルム形成を阻止し、
有機物の除去、除錆効果を高め清浄化にアシスト

[主成分] 過酢酸（1.8～2.0%）、過酸化水素（6%未満）、酢酸（約20%）
無機酸、除錆剤



（注意）

製品ラベルに記載されている使用方法と
注意事項を確認してからご使用ください。

MEDITOOL
CORPORATION

●炭酸カルシウム溶解性

	プレモーブBC	プレモーブSC	酢酸	
濃度	1/100	1/100	1/200	1/500
pH	2.3	3.0	3.0	3.1
CaCO ₃ 溶解量	1.8g	2.6g	3.7g	1.6g

それぞれの試験液1Lに炭酸カルシウムを、0.1gずつ投入しスターで攪拌しながら溶解した。
攪拌しても溶解できずに白濁する手前の添加量をCaCO₃溶解量とした。


●除錆効果

	プレモーブBC	プレモーブSC
濃度	1/100	1/100
浸漬時間	60分	10
	180分	9

プレモーブBCとプレモーブSCの希釈液に次亜塩素酸ナトリウムでSUS304プレートを全面腐食させたテストピースを浸漬させ、浸漬時間経過後取り出し、目視により除去度合いを評価した。
試験前の状態を10とし、試験後のテストピースの錆度合いを評価した。


プレモーブBC

プレモーブSC

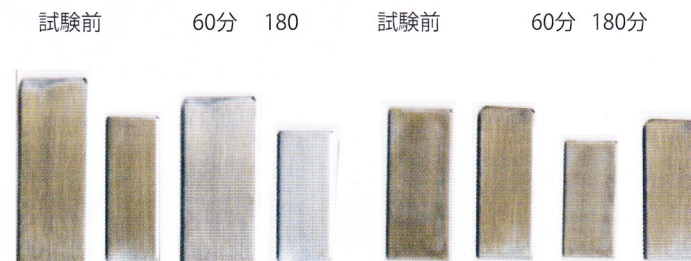


●過酢酸成分安定性

・原液とタンク希釈液の安定性

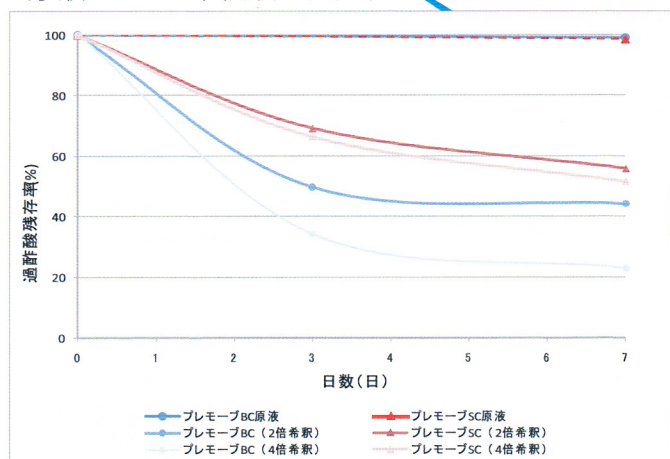

プレモーブBCとプレモーブSCについて、それぞれ原液と、2倍、4倍の倍率に希釈し、密閉して、原液は38℃暗所に、希釈液は室温暗所に保管した。保管日数毎に過酢酸量を測定した。

・末端希釈液の安定性

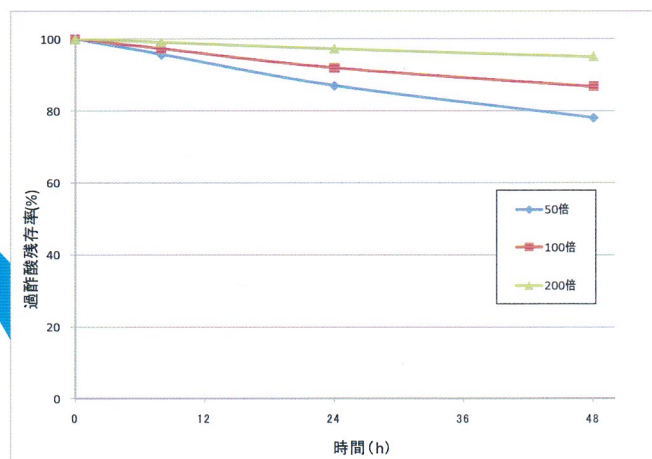

プレモーブBCを50倍、100倍、200倍に希釈し密閉して、室温暗所に保管した。保管時間毎に過酢酸量を測定した。

保管/荷姿

- ◆ 有効期限: 未開封の状態では製造後1年間
- ◆ 内容量: 10kg タフテナー×1本/箱

発売元

MEDITOOL
CORPORATION

株式会社 **メディツール**

(本社) 福岡県みやま市瀬高町文廣1501-1

TEL (0944) 62-4753
FAX (0944) 62-4753

代理店

