

人工透析装置用除菌剤(過酢酸系)

プレモーブ-SC

PREMOVE-SC

低濃度でも高い除菌効果を示す



(注意)

製品ラベルに記載されている使用方法と注意事項を確認してからご使用ください。

MEDITOOL
CORPORATION

人工透析装置用除菌剤(過酢酸系)

プレムーブ-SC

環境

安全

装置

[主成分] 過酢酸(約2.5%)、過酸化水素(6%未満)、酢酸(約27%)

Point 1

低濃度においても優れた除菌・洗浄効果を示し、バイオフィルム形成阻止能を高め、清浄化にアシストします

Point 2

過酸化水素が6%未満であり医薬用外劇物に該当しない組成なので取り扱いが容易です。
非塩素系なので排水でのクロラミン等の塩素化有機物の発生の心配もありません。

Point 3

次亜塩素酸Naに比べ、装置使用部品(ステンレス部品)への劣化影響が低いです。

使用方法

末端希釈倍率が50~100倍になるように薬液タンクに調整してください。送液は30分以上行い、場合によっては封入時間を取り、その後十分な水洗(60分以上)を行ってください。除菌作用、炭酸カルシウムの付着状況に応じ、希釈濃度や封入時間を調整してください、成分保持のため、薬液タンクに調整した溶液は、1週間以内に使い切ってください。

保管/荷姿

- ◆ 有効期限: 未開封の状態で製造後1年間
- ◆ 荷姿: 5kgキューピテナー×2本/箱

発売元

MEDITOOL
CORPORATION

株式会社 メディツール

(本社) 福岡県みやま市瀬高町文庫1501-1

TEL (0944) 62-4753

FAX (0944) 62-4753

代理店

